

## 【Vistaでの起動手順:メドバイザーver.2】


STEP1. 画面左下のスタートボタンをクリックし、コントロールパネルを開く



STEP2. クラシック表示をクリック (すでにクラシック表示の場合は、STEP3に進



### STEP3. ユーザーアカウントをクリック

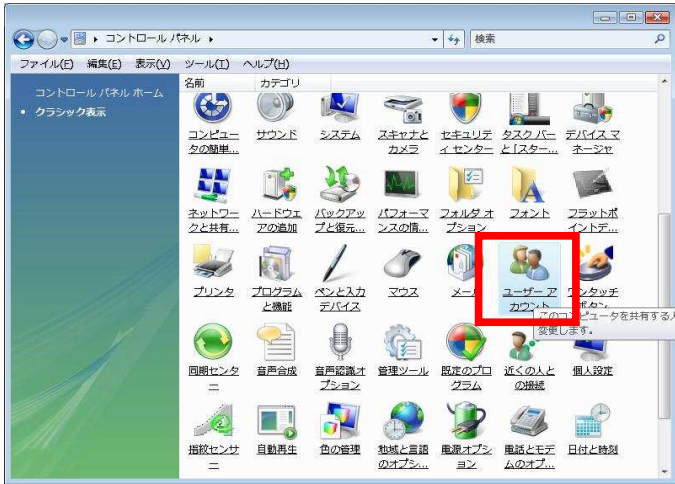


### STEP4. ユーザーアカウント制御の有効化または無効をクリック




### STEP5. ユーザーアカウント制御の「続行」をクリック



STEP6. チェックをはずし、OKをクリック

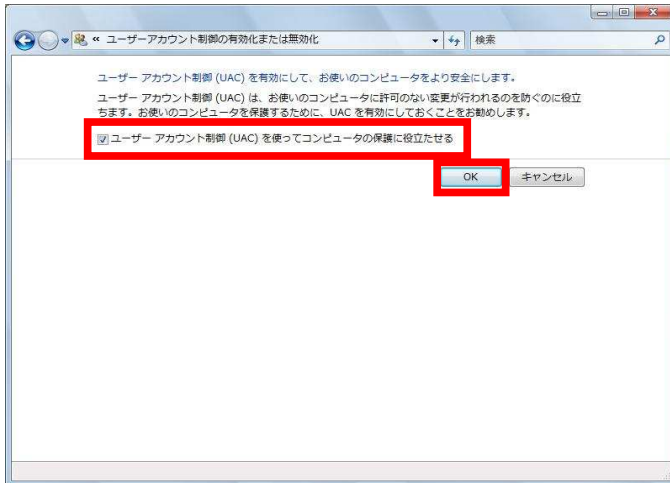


STEP7. 後で再起動するをクリック

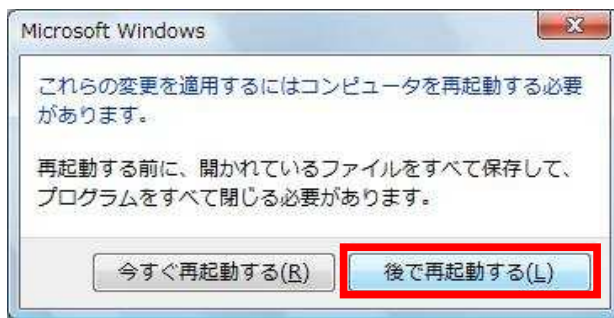


STEP8. メドバイザーのアイコンを右クリックし、プロパティを起動




## STEP9. 互換性タブを選択

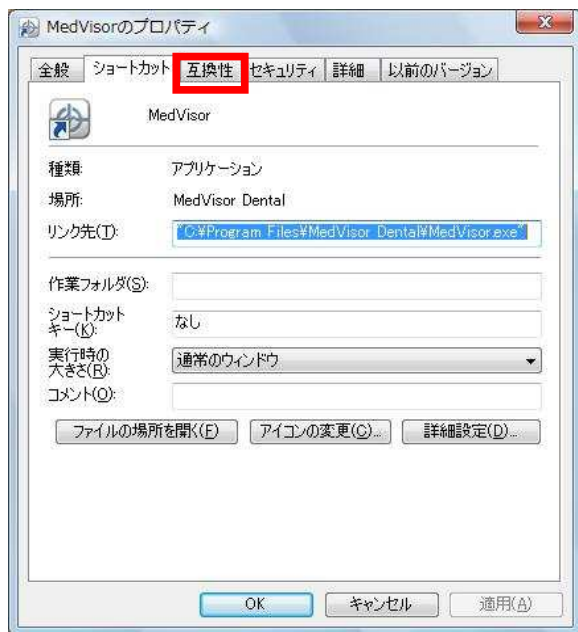

## STEP10. 管理者としてこのプログラムを実行するにチェックを入れる

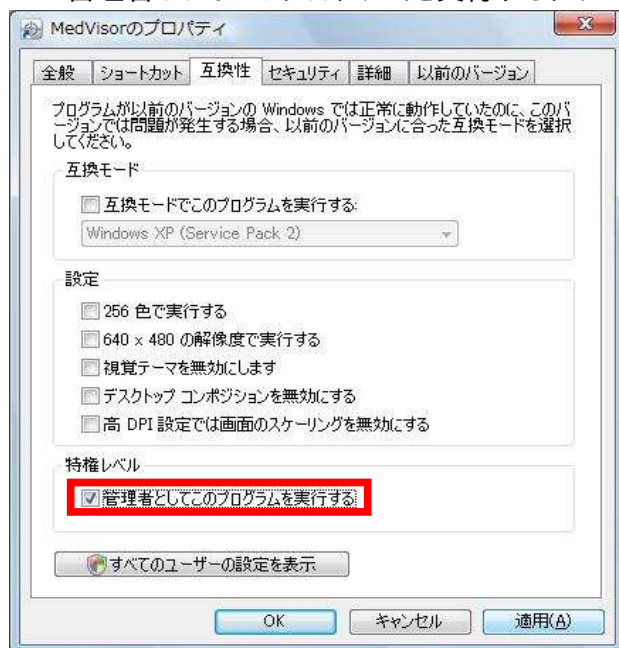

STEP11. 適用、OKをクリックし、この画面を閉じる

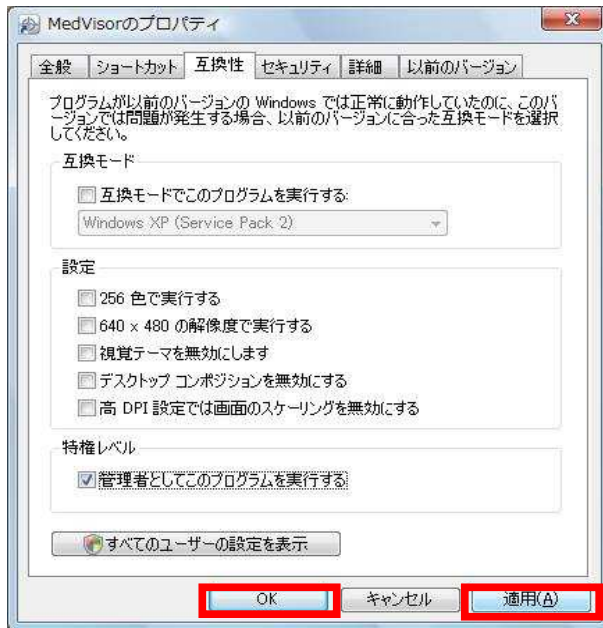

STEP12. PCを再起動する。

STEP13. PCを起動後にメドバイザーを起動し、「トライアル」または「ライセンス」をクリックしてご使用ください。

デモCDの場合は「トライアル」、購入された場合は「ライセンス」をクリックしてご使用ください。

操作に関しましては、製品に同封されている操作手順書か、Disk2に格納されている「Ver2 IFU.pdf」をご参照ください。)