

## インストール手順 (Windows 7 / Vista)


- STEP1. Disk1を挿入すると下の図のような画面が表示され、「フォルダを…」をクリックする。




- STEP2. Diskの中身が下の図のように表示されるので、setup (setup.exe) を右クリックして「プロパティ」をクリック。




- STEP3. 「互換性」タブをクリックして(1.), 特権レベルに✓を入れて(2.), 「適用」(3.) 「OK」(4.)の順番にクリックする。

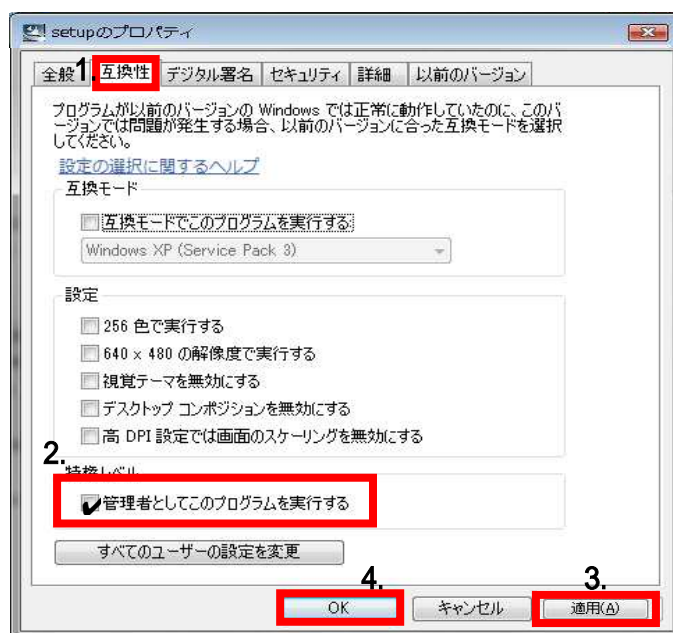

STEP4. 下の画面が表示されると、日本語を選択していることを確認し、「OK」をクリック。

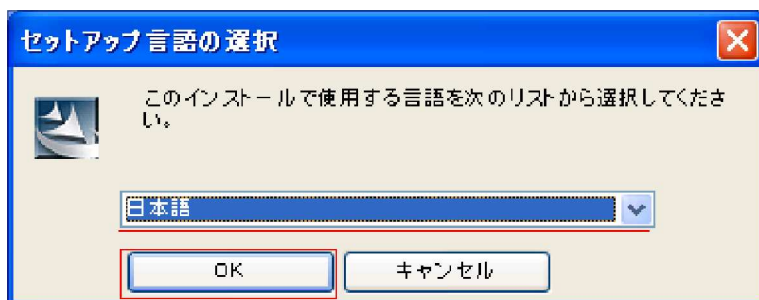


STEP5. インストールする項目が表示されます。「Install」をクリックしてください。  
\*インストールされる項目はPC環境によって異なります。

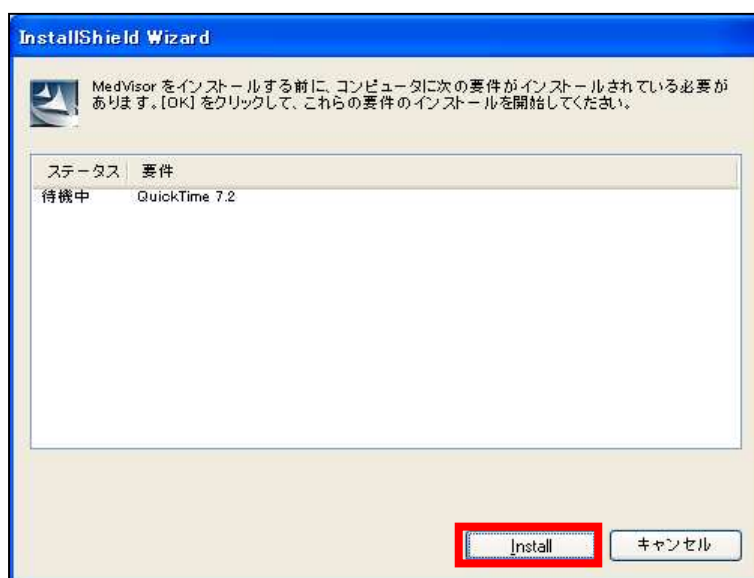

STEP6. (MedVisor Dental ver.2のインストール)「次へ(N)」をクリックします。



- STEP7. 使用許諾書に目を通していただき、よろしければ「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を選択して「次へ(N)」をクリックします。

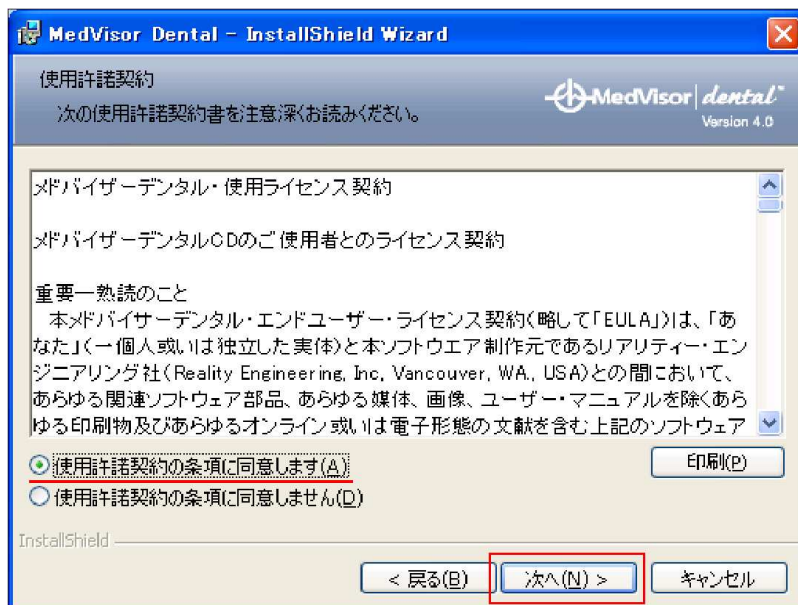


- STEP8. ユーザー名、所属を入力します。「このコンピュータを使用するすべてのユーザ(A)」にチェックをつけて「次へ(N)」をクリックします。



- STEP9. 「インストール(I)」をクリックします。



STEP10. インストール中の画面が表示されます。

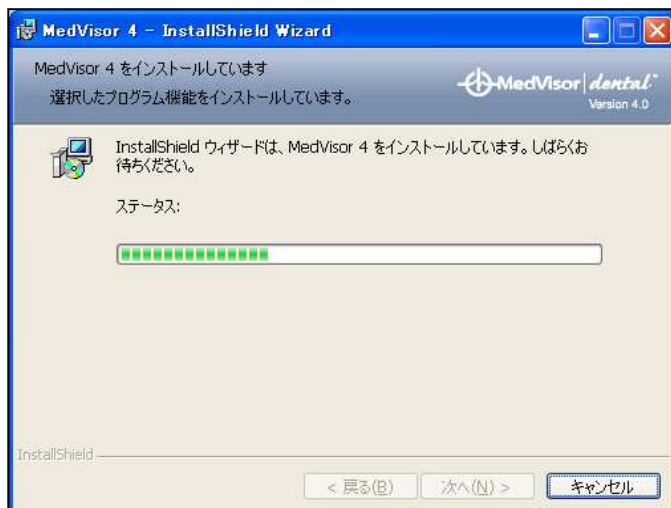

STEP11. 「ディスク2を挿入してください。」と表示された後、Disk1を取り出し、Disk2をセットして「OK」をクリックしてください。




STEP12. Disk2のインストールが始まります。




STEP13. インストールが完了しました。  
「完了」をクリックしてください。




STEP14. Disk1に入れ替え、CD内のファイルを表示します

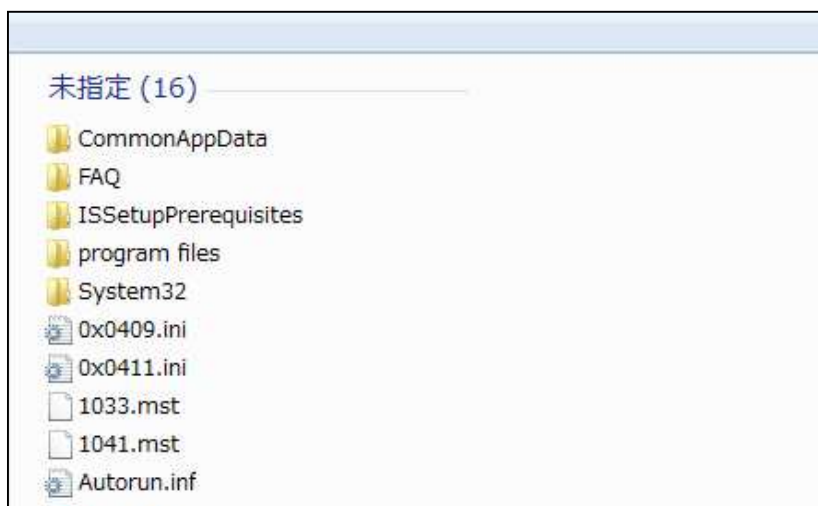


STEP15. ISSetupPrerequisitesというフォルダを開く

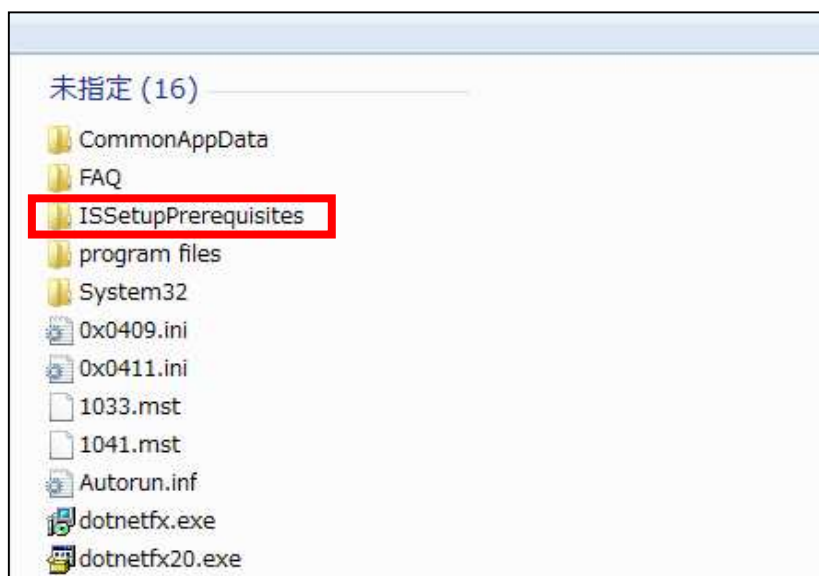

STEP16. QuickTime7.2というフォルダを開く

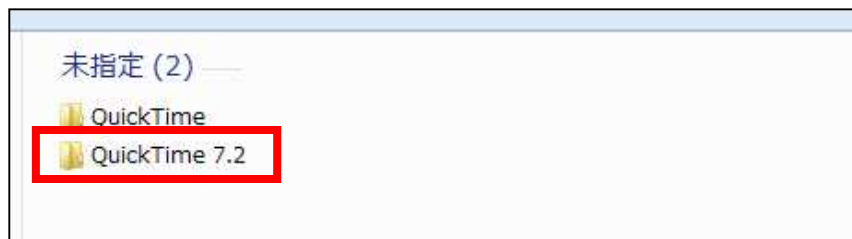

STEP17. QuickTime7.2.0.240.msiをダブルクリックしてインストールする

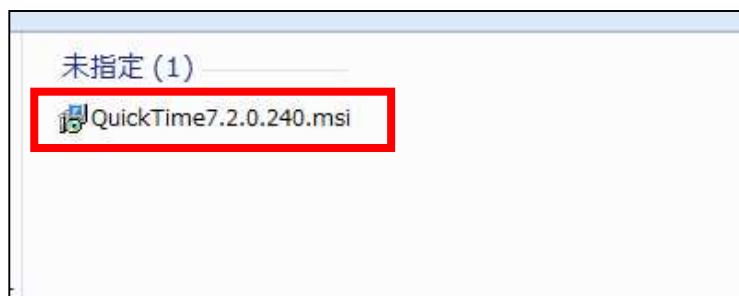

STEP18. インストールの最後で「購入しない」を選択すると完了

