## メドバイザーデンタル Ver. 2: QuickTime の再インストール手順

まず、QuickTimeをアンインストールする必要があります。

1-01. スタートボタンを左クリックし、コントロールパネルを選択してください。



1-02.「プログラムの追加と削除」を左クリックします。 注意: Windows Vistaの場合、まずクラシック表示を左クリックし、 「プログラムと機能」を左クリックください。



## 1-03. QuickTimeまで下にスクロールし、QuickTimeを左クリックします。 すると、QuickTimeのアンインストーラーが開始されます。

			x
( را ا	(ネル → プログラムと機能	検索	P
<b>タスク</b> インストールされた更新プロ グラムを表示 Windows Marketplace で新 しいプログラムを取得	プログラムのアンインストールまたは変更 プログラムをアンインストールするには、一覧からプログ 変更]、または [修復] をクリックします。	ラムを選択して [アンインストール]、 [	0
購入したソフトウェアを表示(	● 登理 ◆ 目 衣示 ◆ ひょうストール 砂 変更 名前	98 1948 発行元	•
デジタル ロッカー) Windows の機能の有効化また は無効化	<ul> <li>■ P C ドキュメントナビゲータ</li> <li>■ PDIC Unicode for EIJIRO IV</li> <li>PhotoNow! 1.0</li> <li>■ Pluafree NETWORK</li> </ul>	ReliefOffice 富士诵株式会社	
	QuickTime	Apple Inc.	
	👷 Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	-
	<u>د</u> اً ۳		F
	QuickTime 発行元: Apple Inc. サイス	(: 78.6 MB	1

アンインストールが完了した後、メドバイザーデンタルのディスク1を入れます。 自動的にインストーラーが開始される場合、「キャンセル」を左クリックしてください。

1-04. スタートボタンのうえに右クリックし、エクスプローラを選択してください。



1-05. 左側にリストアップされている項目のMedvisor Dental(または 「DVD RWドライブディスク Medvisor Dental」)まで下にスクロールして左クリックします。 すると、右側が変更され、ISSetupPrerequisites という右側にあるアイコンを 左クリックしてください。



1-06. QuickTime7.2 を左クリックします。

🎍 整理 👻 📰 表示 👻 🛞 ディスク	バに書き	的人心					
フォルダ ■ デスクトップ	*	名前 現在ディ	サイズ スクにあるファイ	<b>種類</b> ル(2)	更新日時	場所	
<ul> <li>■ Administrator_</li> <li>パブリック</li> <li>■ コンピュータ</li> <li>■ ローカルディスク (C:)</li> <li>■ ローカルディスク (D:)</li> <li>■ DVD RW ドライブ (E:) Disk1</li> <li>■ CommonAppData</li> <li>■ FAQ</li> <li>■ ISSetupPrerequisites</li> <li>■ program files</li> <li>■ System32</li> <li>■ HD DVD-ROM ドライブ (F:)</li> <li>■ リムーパブルディスク (G:)</li> <li>■ BD-ROM ドライブ (H:)</li> <li>■ ネットワーク</li> <li>■ コントロールパネル</li> <li>◎ ごみ箱</li> <li>■ 大共有ショートカット</li> </ul>	H		QuickTime ファイル フォルタ	,	Quick ファイ	Fime 7.2 ル フォルダ	]

1-07. QuickTime7.2.0.240.msi を左クリックして実行してください。



1-08. InstallShield Wizard画面が表示されます。各設定でプログレスバーが表示されます。



1-09. QuickTime For Windows画面が表示される。次へ(N)ボタンをクリックします。

📃 rei	adme-ja - 义モ帳	
ファ・ QuicCD-Rラ 注 フそ自動MedV	QuickTime for Windows           ようこそ QuickTime 7 インストーラへ           QuickTime は、コンピュータでデジタルメディアを再生するための、非常に高い報告を受けているアップルのソフトウェアです。QuickTime にとって、ビデオ、グラフィックス、音楽、サウンド、スプライト、VBR パンラマ、アニメージョン、インターネット経由のストルームメディアなど、さまさねを運算のメディアを楽しむことができます。           このウィザードに表示される手順に従って操作すれば、QuickTime Player や QuickTime Veit Time ジス フィンワーションのために必要な QuickTime ジス フィンワーションのために必要な QuickTime ジス フィンフィンフィントールできます。開始なするには、レ次へ」を	
*	QuickTime 7.0350 < 戻る(B) (次へ(N)) キャンセル	* *

1-10. QuickTime使用許諾契約画面を表示する。はい(Y)ボタンをクリックします。



1-11. Quick Time インストール先フォルダの選択画面が表示されます。 インストール先ディレクトリを選択し、次へ(N)ボタンをクリックします。

QuickTime for Windows		×
インストール先フォルダを選択 QuickTime ファイルをインストールするフォルダを選択し	ってください。	Ø
QuickTime ファイルは次のフォルダにインストールされま	tす。	
このフォルダにインストールする場合は、D欠へ]をクリック [参照] をクリックして別のフォルダを選択してください。	っしてください。別のフォルダにインスト・	ールする場合は、
インストール先フォルダ C:¥Program Files¥QuickTime¥		参照( <u>B</u> )
InstallShield	< 戻る( <u>B</u> ) (万人(N))	×+>>セル

1-12. QuickTimeインストーラ準備画面が表示されます。プログレスバーが表示されます。

🔲 readme-	ja - 义モ帳	- • ×
ファイル( <u>E</u> )	編集(E) 書式(Q) 表示(Y) ヘルプ(H)	
QuickTime CD-ROMト	のインストール指示に従い、インストールが完了した後、 ライブが完全に停止したことを確認の上、CD1を取り出してください。	*
トライア	QuickTime for Windows	
注意: ト		
フルハー その後、 自動的に MedVisor	Quick Time は、要求された処理を実行中です。	
	アプリケーションを削除しています	
<	InstallShield	•
	7772/4	

1-13. QuickTimeインストール成功画面が表示される。完了ボタンをクリックします。



1-14. QuickTime Pro購入画面が表示される。「購入しない」ボタンをクリックします。



## 1-15. readme-jaファイルを表示され、右上のXボタンをクリックします。 最小化している場合は、タブメニューの右クリックから閉じるを選択します。

